

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набора реагентов

"Калия теллурид, раствор 2%"

НАЗНАЧЕНИЕ

Используют в качестве супплемента при приготовлении питательных сред для выделения возбудителей дифтерии, холеры и других бактерий.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Раствор калия теллурида оказывает бактерицидное действие на большинство видов грамположительных бактерий. Устойчивые к калию теллуриду бактерии образуют окрашенный в черный цвет осадок (теллур).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

В асептических условиях вскрыть флакон с реагентом. Реагент набрать стерильной пипеткой и внести в питательную среду в соответствии с ее прописью.

ФОРМА ВЫПУСКА

10 ампул (по 5 мл) с инструкцией по применению в групповой упаковке.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранение

В упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 18 до 25 °С в течение всего срока годности. Замораживание не допускается.

Транспортирование

С.В. Сидорова

Транспортирование - всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре до 25 °С. Замораживание не допускается.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Для лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности реагента – 2 года. Реагент с истекшим сроком годности применению не подлежит.

Наименование и адрес предприятия-изготовителя:

ООО «МиниМед», 241520, г. Брянск, Супонево, пер. Комсомольский, 4.


Т/ф (4832) 41-63-56, 69-10-71, 92-97-97, 92-97-01.

По вопросам, касающимся качества изделия, следует обращаться по адресу: ООО «МиниМед», 241520, г. Брянск, Супонево, пер.

Комсомольский, 4 и в Институт контроля лекарственных средств ФГУ «НЦ ЭСМП» Росздравнадзора 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 14а, тел. (495) 120-60-96.

Начальник ОТК ООО "МиниМед"

«26» декабрь 2008г.

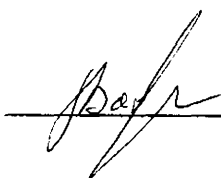

Захаров А.Н.

