

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ


SSNP-3000A

Система Экстракции
Нуклеиновых Кислот



CE Включен в список FDA

ОСОБЕННОСТИ

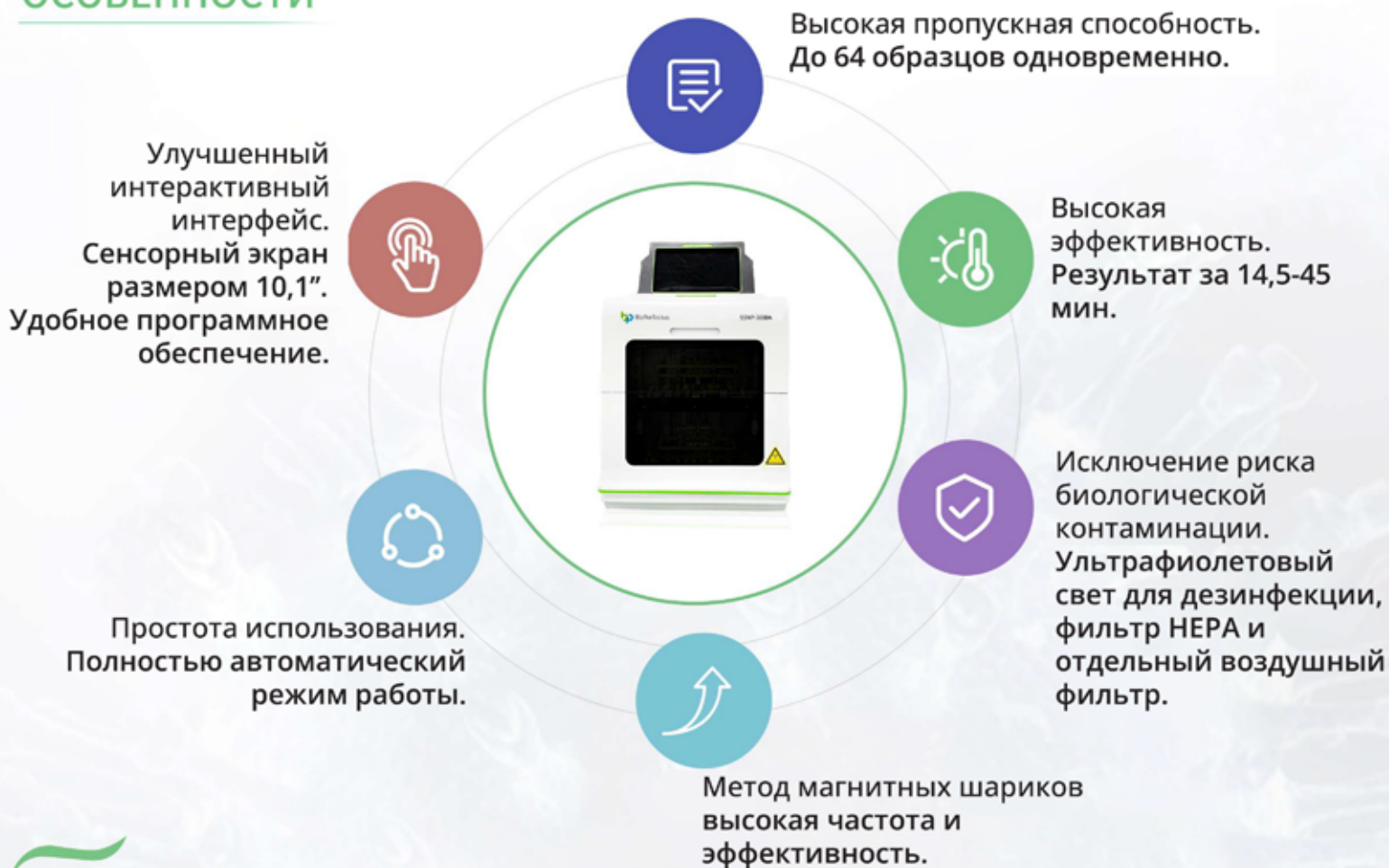

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	SSNP-3000A
Обрабатываемый объём	20 мкл - 1000 мкл
Пропускная способность в образцах	1-64
Эффективность восстановления магнитных шариков	≥98%
Тип планшета	96-луночный планшет
Размер(длина × ширина × высота)	435 × 320 × 575 мм
Вес	28 кг
Тип реагента	Реагент для магнитных шариков
Осцилляционное смешивание	Многорежимный и многоскоростной режим регулировки
Вспомогательный реагент	Набор для экстракции вирусных нуклеиновых кислот (Метод магнитных шариков) (№. по каталогу SDK60104)

Программное управление

Создание новых программ, редактирование и удаление программ, свободное гибкое редактирование настроек системы экстракции.

Температура нагрева

Температура растрескивания при нагреве: от комнатной температуры до 120 °С.
Температура элюирования при нагреве: от комнатной температуры до 120 °С.

Контроль контаминации

Экспериментальная камера оснащена внешним отдельным воздуховодом с фильтром HEPA, в котором биологическая фильтрующая вата может впитывать аэрозоль нуклеиновой кислоты.

УПАКОВКА

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
SDK60104	Viral Nucleic Acid Extraction Kit (Magnetic Bead Method)	32 теста/коробка (16 тестов × 2 планшета) 48 тестов/коробка (16 тестов × 3 планшета) 96 тестов/коробка (16 тестов × 6 планшета)

ТИП ОБРАЗЦА

- Сыворотка, плазма, питательная среда с культурой вируса, спинномозговая жидкость, моча, смыв мазка, надосадочная фекальная жидкость.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕАГЕНТ



Набор Для Экстракции Вирусных Нуклеиновых Кислот (Метод Магнитных Шариков)

- Объем образца: 200 мкл
- Формат: 96-луночный планшет
- Температура хранения: 4-30°C
- Температура транспортировки: 4-30°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Шаг 1: Включите прибор, выполнится самодиагностика
- Шаг 2: Добавьте образец в 96-луночный планшет
- Шаг 3: Поместите планшет в прибор

- Шаг 4: Выберите и запустите программу
- Шаг 5: Экстракция нуклеиновых кислот высокой чистоты происходит автоматически



8 800 550 72 31 | info@paneco-ltd.ru
www.paneco.ru | www.paneco-ltd.ru

